



# VEIDO SKYDAS

Daugkartinio naudojimo  
Su reguliuojama juoste



## Veido skydas su reguliuojama plastikine juosta 300 x 220 x 0.3 mm

### Ypatumai:



Paviršius tinkamas dezinfekcijai alkoholio pagrindu pagamintais skysčiais.



Skaidrus permatomas plastikas užtikrinantis puikų matomumą.



Reguliuojama juosta užtikrina paprastą pritaikymą prie galvos apimties.



Svoris tik: 70 g.



Juosta: polyethylene (PE).  
Skydas: permatomas PET 0.3 mm storio.



Lengvai sujungiamas.

### Quick and easy assembly:

#### Veido skydas su reguliuojama juoste


Skaidrus veido skydas, paprastas naudoti, suteikia veido apsaugą, sumažina tikimybę užsikrėsti oru plintančiais virusais ar bakterijomis. Užtikrina efektyvią apsaugą burnai, akių ir nosies srityms. Labai gerai padeda kaip prevencinė priemonė nuo instinktyvaus veido lietimosi nešvariomis rankomis.

Veido skydą sudaro skaidrus PET skydelis ir reguliuojama PE juostelė. Juostelės pagalba veido skydas lengvai pritaikomas pagal galvos dydį. Tinkamas dizainas leidžia po skydu dėvėti akinius.

Veido skydas yra patogus dėvėti, lengvas, gali būti dėvimas daug valandų. Apvalios formos nuo pat viršaus iki apačios padidina komfortą dėvint.

Veido skydas yra daugkartinis. Rekomenduojama net ir dėvint veido skydą naudoti veido kaukę.


#### Rinkinį sudaro:

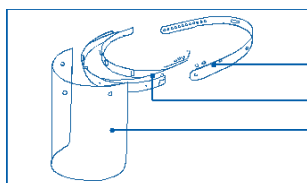


1. Reguliuojama juosta
2. Galvos juosta
3. Skydas




1. Prieš naudojant veido skydą pasirūpinkite gera rankų higiena nusiplaudami rankas ir dezinfekuokite skydo dalis.

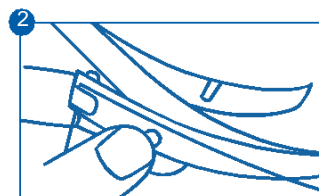

2. Įstatykite skaidrų skydą į galvos juostoje paruoštas angas.

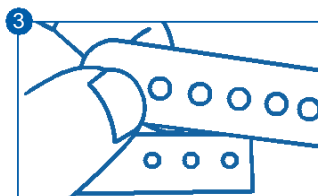

3. Įstatykite reguliavimo juostos angas į galvos juostos dalį.

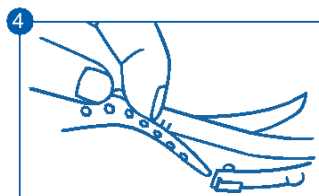

4. Reguliuokite juostos plotį pagal galvos dydį naudodami skylutes ant juostos.